


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВРАЧА-АКУШЕРА по забору пупочного канатика





! Забор пупочного канатика производят только **после** забора пуповинной крови! Пожалуйста, используйте для обработки биоптата только спиртовые салфетки **из комплекта**!

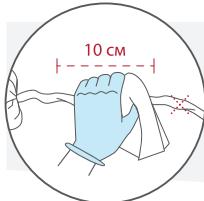

Отступив на несколько сантиметров от места введения иглы (в направлении плаценты), обработайте канатик полностью спиртовыми салфетками на протяжении примерно 10 см, удаляя загрязнения.

Наложите на обработанный участок канатика первый пупочный зажим.

Затем на расстоянии 5 см от зажима по направлению к плаценте наложите на канатик второй пупочный зажим.

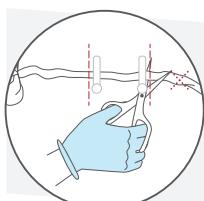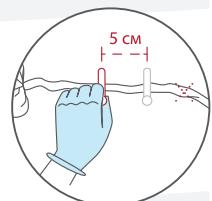

Пересеките ножницами отрезок пуповины снаружи от пупочных зажимов.

! Запрещается использовать любые антисептики помимо чистого 70% этилового или изопропилового спирта без добавок. Не проводить длительную экспозицию антисептиков в отношении биоптата канатика (максимум 10 секунд).

Поместите в контейнер с транспортной средой биоптат канатика, плотно закрутите крышку.


! При хранении и транспортировке собранного биоптата запрещается использовать морозильную камеру, замороженные хладоэлементы и всё, что может привести к замораживанию биоптата.



При сборе и транспортировке избегать резких перепадов температур биоптата канатика во избежание температурного шока. Например, при сборе нельзя опускать еще теплый канатик в очень холодную транспортную среду. Перед сбором нужно выдержать контейнер полчаса при комнатной температуре, а после сбора положить контейнер с биоптатом в холодильник для медленного плавного охлаждения.



Укажите на контейнере ФИО роженицы.

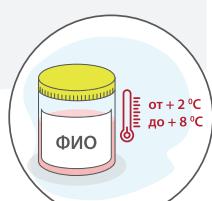

Поместите контейнер в транспортный контейнер и положите на временное хранение в холодильную камеру холодильника с температурой от + 2 °C до + 8 °C.

! После забора пупочного канатика контейнер должен храниться при температуре **от + 2 °C до + 8 °C в холодильнике!**

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ГЕМАБАНКА®



Биострахование ребенка -

не праздный вопрос, а важное решение, которое принимается один раз и на всю жизнь. Именно такое решение предстоит принять будущим родителям. А задача врача - высказать свое мнение и проинформировать будущую роженицу о свойствах пуповинной крови. Быть компетентным в этой теме.

Гемабанк® приглашает к сотрудничеству

медицинские центры, женские консультации, родильные дома и врачей акушеров - гинекологов из всех регионов РФ для информирования общественности о возможности сбора пуповинной крови при родах.

Направления сотрудничества



Организация совместных мероприятий, симпозиумов, конференций

Обучение врачей

Информационная работа с пациентами

Как стать партнером Гемабанка® и принять участие в обучении и совместных мероприятиях?

8 (800) 500-46-30