


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВРАЧА-АКУШЕРА

по сбору пуповинной крови





Сбор крови из пуповины желателно произвести **до рождения плаценты** или (в случае оперативного родоразрешения) **до того, как плацента будет извлечена из полости матки!**

Если не удалось произвести сбор крови до рождения или извлечения плаценты, поместите плаценту **на лоток** и проведите все операции, как описано ниже.

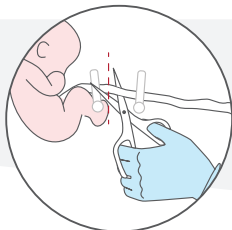



1 Наложите зажимы на пуповину и перережьте пуповину.

2 Тщательно продезинфицируйте место будущего вкола иглы.

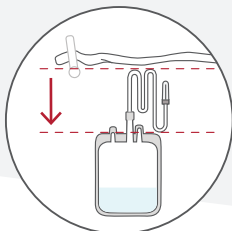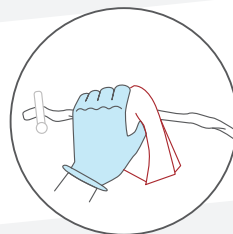


3 Поместите контейнер (систему для забора крови) ниже уровня плаценты.


4 Снимите колпачок с иглы.

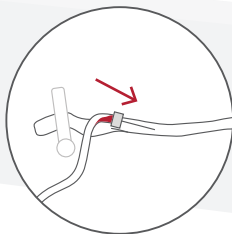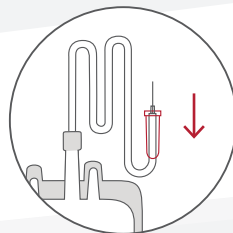

5 Введите иглу в **продезинфицированный участок** вены пуповины.



6 Время от времени **встряхивайте пакет с кровью** для того, чтобы кровь перемешалась с антикоагулянтом.

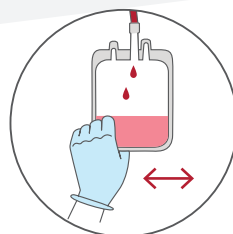

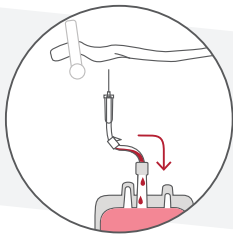



После того, как кровь прекратила поступать, выньте иглу из вены и **поднимите трубку системы**, давая крови стечь в контейнер.

Натяните на иглу защитный чехол до щелчка

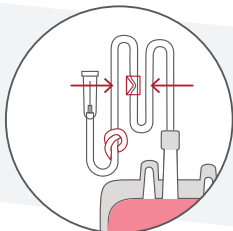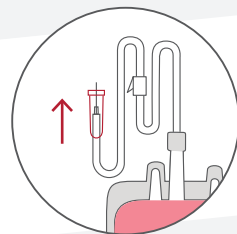

Закройте замок на трубке. Сделайте защитный узел из трубки, через которую производился забор крови и туго его затяните.

Напишите на контейнере (мешке для сбора крови) ФИО роженицы.

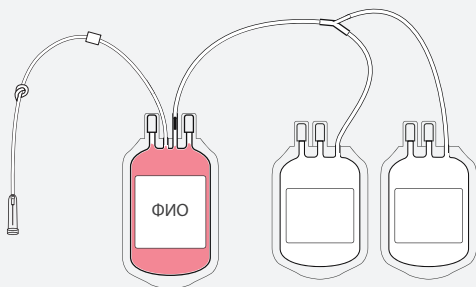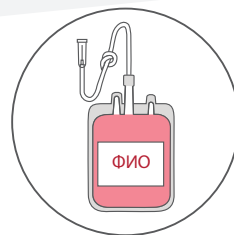

Так должна выглядеть система после сбора



После сбора крови и до того момента, как она будет доставлена в Гемабанк, кровь должна храниться при **комнатной температуре!**

Ни в коем случае не пережимайте трубку, соединяющую основной мешок со вспомогательными (два меньших)!

Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № Л041-01137-77/00332098 от 13 июня 2019 года.
Гемабанк является товарным знаком ПАО «ММЦБ»

119333, г. Москва, муниципальный округ Гагаринский вн.тер.г. ул.Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
info@gemabank.ru | www.gemabank.ru