


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВРАЧА-АКУШЕРА



по забору пуповинной крови

- ! Забор крови из пуповины желателно произвести **до рождения плаценты** или (в случае оперативного родоразрешения) **до того, как плацента будет извлечена из полости матки!**
Если не удалось произвести забор крови до рождения или извлечения плаценты, поместите плаценту **на лоток** и проведите все операции, как описано ниже.
- ! После забора пуповинной крови необходимо обязательно **заполнить акушерский анамнез.**

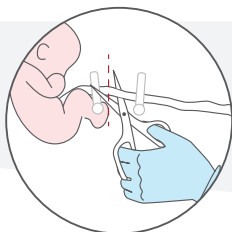



Наложите зажимы на пуповину и перережьте пуповину.

Тщательно продезинфицируйте место будущего вкола иглы.

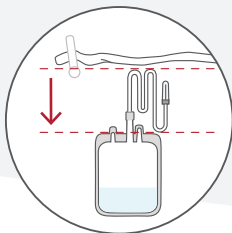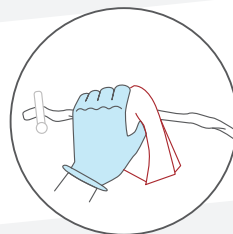


Поместите контейнер (систему для забора крови) ниже уровня плаценты.


Снимите колпачок с иглы.

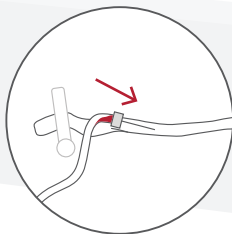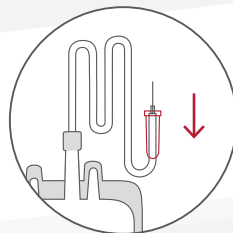


Введите иглу в **продезинфицированный участок** вены пуповины.

Время от времени **встряхивайте пакет с кровью** для того, чтобы кровь перемешалась с антикоагулянтom.

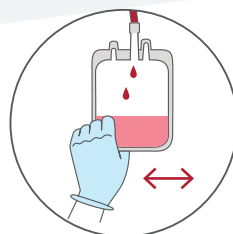


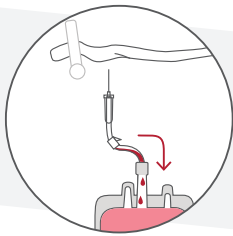

После того, как кровь прекратила поступать, выньте иглу из вены и **поднимите трубку системы**, давая крови стечь в контейнер.

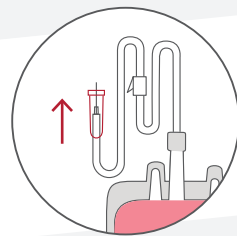


Натяните на иглу защитный чехол до щелчка

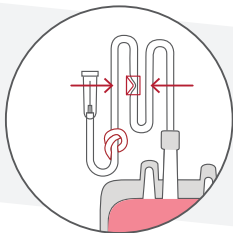

Закройте замок на трубке. Сделайте защитный узел из трубки, через которую производился забор крови и туго его затяните.



Напишите на контейнере (мешке для забора крови) ФИО роженицы.

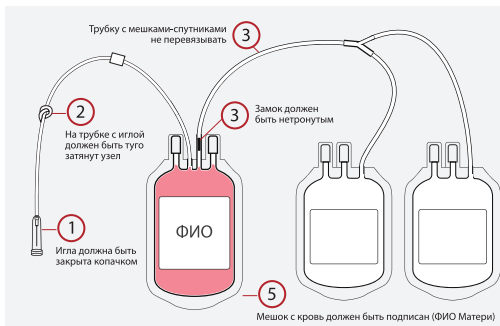

! Работать только с одним мешком с антикоагулянтom и трубкой. Другие мешки и трубки не трогать.

Так должна выглядеть система после забора



После забора крови и до того момента, как она будет доставлена в Гемабанк, кровь должна храниться при **комнатной температуре!**

Ни в коем случае не пережимайте трубку, соединяющую основной мешок со вспомогательными (два меньших)!

Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № Л041-01137-77/00332098 от 13 июня 2019 года.
Гемабанк является товарным знаком ПАО «ММЦБ»

117246, г. Москва, ул. Научный проезд 8 стр. 1, офис №333
info@gemabank.ru | www.gemabank.ru